

Napięcie: 240V/50/60Hz  
220V/50/60Hz  
Moc: 100 VA  
Bezpiecznik: 3A

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

## SUPER SKIN SCRUBBER AM-232



SKIN SCRUBBER



 **ACTIV & MayStar**  
54-401 Wrocław,  
ul. Szwedzka 19A  
tel.: 071 356 97 30  
www.activeshop.pl

**TWÓJ-DYSTRYBUTOR:**






## KARTA GWARANCYJNA

**UWAGA :** FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDA PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH, KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJ CE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJ ZAKUPU NA WŁASN ODPOWIEDZIALNO .

### WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstaw przyj cia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodno ci towaru z umow zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesi czna odpowiedzialno c sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupuj cy.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawiera :
  - dokładny adres reklamuj cego • dowód zakupu • kontakt telefoniczny • dokładny opis usterki
  - sytuacj w której usterk stwierdzono • wszystkie podane informacje musz by CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ci gu 28 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamuj cego wymaganych dokumentów
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawieraj ce wymaganych danych z punktu 4 nie b d realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamuj cego .
7. Przesyłki anonimowe co do których nie mo na ustali danych wysyłaj cego po upływie 3 miesi cy b d utylizowane.
8. Za dat przyj cia reklamacji uznaje si dat dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamuj cego wymaganych dokumentów. Za date wykonania naprawy uwzględnia si date wysłania reklamowanego produktu do klienta
9. Ró nice wynikaj ce z indywidualnych ustawie komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mog by podstaw reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegaj wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta  
Reklamacji nie podlegaj :
  - Bezpieczniki • Przewody zasilaj ce • Grzałki elektryczne, termostaty • Produkty zalane wod
  - Uszkodzenia mechaniczne • Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia w szczególno ci lampy UV I Frezarki
  - Usterki powstałe na skutek niewła ciwej konserwacji • Produkty z przeceny, wyprzedaży lub ekspozycji
  - Przegrzania urz dzenia na skutek zbyt długiej pracy ( 40 min pracy 20 min przerwy )
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umow kupuj cy mo e ada :
  - w pierwszej kolejno ci - nieodpłatnej naprawy.
  - je li naprawa jest niemo liwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo je eli sprzedawca nie zdoła uczyni zado c takiemu adaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za po rednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich b d rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporz dzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki s ubezpieczone , Nale y pami ta aby protokoły uszkodzenia były sporz dzane rzetelnie i zgodne z prawd

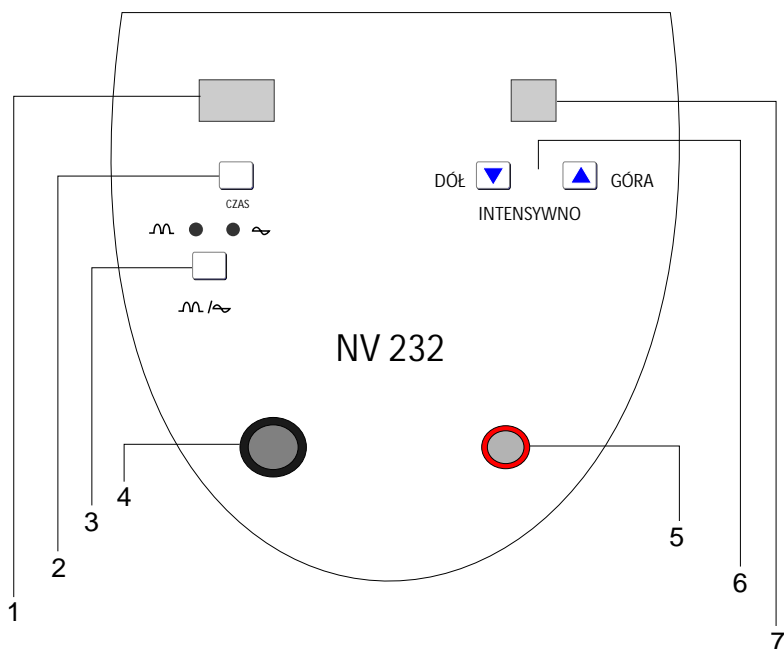

1. WY WIETLACZ CZASU
2. USTAWIANIE CZASU PRACY
3. ZMIANA TRYBU FAL ULTRAD WI KOWYCH
4. GNIAZDO SZPATUŁKI
5. GNIAZDO ELEKTRODY
6. REGULACJA INTENSYWNO CI GÓRA-DÓŁ
7. WY WIETLACZ INTENSYWNO CI

### UWAGA !

CZAS PRACY URZ DZENIA: 40 min NAST PNIE MUSI ODBY SI PRZERWA 20 min  
 PO DOSTARCZENIU URZ DZENIA DO GABINETU NALE Y ODCZEKA 3h  
 PRZENOSZENIE URZ DZENIA Z NISKICH TEMP. - PRZED URUCHOMIENIEM  
 URZ DZENIA NALE Y ODCZEKA 3h

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny ..... Data sprzedaży .....  
 ..... podpis sprzedawcy  
 pieczęć

Ultra dźwiękowy aparat służy do bezbolesnego i bezinwazyjnego oczyszczania skóry oraz pielęgnacji wykorzystujący zjawisko kawitacji. Kawitacja jest powszechnie wykorzystywana w kosmetyce do pielęgnacji twarzy i ciała.

Urządzenie to daje możliwość przeprowadzania liftingu twarzy bez użycia skalpela oraz wprowadzenia witamin i preparatów w głębię skóry.

#### DZIAŁANIE:

- ujędrnia i liftinguje skórę
- spłyca zmarszczki
- leczy i hamuje trądzik
- zamyka rozszerzone pory
- usuwa martwy naskórek, zaskórniaki i wrogry
- spłyca blizny
- stymuluje komórki do naturalnej odnowy
- przy peelingu powstanie kalogenu
- daje skórze efekt sterylizujący

#### PRZECIWSKAZANIA

- ciąża
- rozrusznik serca
- nowotwory skóry
- niektóre alergię skórne i choroby skóry
- nie wykonywać zabiegów (peeling kawitacyjny, lifting kawitacyjny) blisko oczu

Zabieg może przeprowadzać personel wykwalifikowany posiadający licencję (dyplom) ukończenia szkoły kosmetycznej. Nie bierzemy odpowiedzialności za wypadki oraz uszkodzenia ciała związane z niewłaściwym zastosowaniem urządzenia.

#### OPIS ZAGIEGU:


1. Zmyć makijaż emulsją Sensitive Maystar i tonizować tonikiem Sensitive.
2. Zwiłają skórę płynem w celu:
  - powstania zjawiska kawitacji na powierzchni skóry
  - uniknięcia przegrzania skóry i niedopuszczenia do poparzenia
  - umożliwienia przepływu prądu galwanicznego, wspomagając jego działanie ultradźwięków
3. Skórę można zwilżyć płynami takimi jak:
  - woda termalna Sensitive Maystar
  - sól fizjologiczna

Ultrasonic peeling – należy używać do zabiegów głównie w obrębie twarzy, szyi (oprócz grdyki i włośniczków), rąk, dekoltu i ciała.


Możliwe są 4 metody pracy – cztery funkcje:

- PEELING - złuszczenie i wygładzenie
- LIFTING - ujędrnianie i nawilżenie
- SONOFOREZA - wprowadzanie preparatów
- JONOFOREZA - wymiana jonów

#### PEELING KAWITACYJNY - OCZYSZCZANIE

1. Włóż urządzenie.
2. Ustaw czas zabiegu (30 min).
3. Wybierz funkcję 
4. Podać klientce do trzymania elektrod na cały czas zabiegu.
5. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczną lub niegazowaną wodę mineralną).
6. Dotknąć głowicę skóry i przesuwać ją do przodu (zgodnie z przebiegiem mimiki) tak by płyn ulegał rozpyleniu. Szpatułkę trzymać pod kątem 45°

#### OCZYSZCZANIE

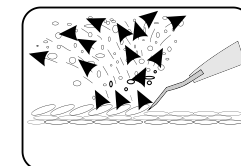

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i mieszkami włosowymi, zdezynfekowana (bakterie i drobnoustroje zostają rozerwane).

Skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

\* W aparacie wykorzystano efekt kawitacji na powierzchni blachy głowicy ultradźwiękowej. Fala ta powstaje od drgań wytworzonych przez przetworniki piezoceramiczne głowicy. Kawitacja - to rozerwanie kropli cieczy naniesionej na powierzchni skóry. Powoduje ona powstanie mikrobłoków, które wytwarzają ruchy konwekcyjne - transportują je. Powstałe mikrobłoki cieczy powodują także depolaryzację oraz katalizację powierzchniową. Peeling (ang.) - złuszczenie naskórka.

Peeling Kawitacyjny to peeling wykorzystujący zjawisko kawitacji.

Pod wpływem ultradźwięków, na powierzchni skóry dochodzi do szybkiego wytwarzania siarczanu chondroityny, co wywołuje rozbięcie komórek warstwy rogowej naskórka (złuszczenie) - bez jakichkolwiek uszkodzeń komórek pozostałych głębiej. Działanie fali ultradźwiękowej podobne jest do mikromasażu komórkowego o charakterze biostymulującym.



# ULTRA SONIC

## SONOFOREZA (WPROWADZANIE PREPARATÓW)

1. Ustaw czas wprowadzania preparatów na 15 minut.

Nanie na skór odpowiedni preparat

( dowolnie wybrane serum : caviar therapy , cellular expression Vit.C ,cellular therapy

Gold lub Satin Expression albo Cellular therapy Energy)

Aplikator głowicy delikatnie przyłożysz płasko do twarzy i przesuwasz

zgodnie z kierunkiem powiększenia.

Nie przyciskasz mocno głowicy do skóry – muska .

## LIFTING - MIKROMASA

1. Zmieni funkcję na 

2. Przejdź do następczej funkcji INTENSITY (4).

3. Ustawisz daną moc ultradźwięków.

Jeśli klientka nie odczuwa dyskomfortu przy zabiegu możesz na ustawić INTENSITY (4)

i PULSE (3) na maksymalne ustawienie . Szybciej wykonamy zabieg.

4. Nanie na skór odpowiedni preparat np. serum CaviarTherapy , Gold Serum lub

Satin Expression lub przejdź do ultradźwięków (jeśli chcemy wykonać samą mikromasę

bez wprowadzania preparatów).

Aplikator głowicy trzymasz jak przy sonoforezie.

Dotknij głowicę do skóry i przesuwasz zgodnie z kierunkiem powiększenia.


Nie przyciskasz mocno głowicy do skóry – muska .

Wykonywanie mikromasażu zaleca się na skórkach dojrzałych!

Ta faza zabiegu powoduje przenikanie rozdrobnionych cząstek preparatów do głębiej położonych warstw skóry. Mamy tu do czynienia z nawilżeniem wewnętrznym, spowodowanym sprężaniem i rozprężaniem struktur komórkowych czyli mikromasą.

To działanie wywołuje poprawę mikrokrążenia i aktywację pompy sodowo-potasowej, która przy pomocy wszystkich procesów odnowy komórkowej, poprzez zaopatrzenie komórki w tlen i substancje odżywcze oraz doprowadzenie wody do najgłębiej położonych warstw skóry. Preparaty powinny być olejowe, wodniste, czyste chemicznie.

Po zakończeniu tej fazy zabiegu, skóra może być przez kilka minut zaczerwieniona ale zaczerwienienia doskonale zniweluje i uspokoi krem hypoalergiczny z serii Sensitive firmy MayStar oraz maseczka algowa Touch of Beauty z serii ACTIV Beauty.

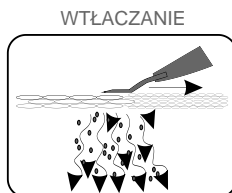

## DEZYNFEKCJA:

Dezynfekujemy tylko element metalowy szpatuły, używając płynu do dezynfekcji Aerodesin 2000

- spryskujemy wacik bezpyłowy i przecieramy powierzchnie metalowe które wykonujemy zabieg

- czynność powtórzysz czterokrotnie

## UWAGA !

CZAS PRACY URZĄDZENIA: 40 min NASTĘPNIE MUSI ODBYĆ SIĘ PRZERWA 20 min

PO DOSTARCZENIU URZĄDZENIA DO GABINETU NALEŻY ODCZEKAĆ 3h

PRZENOSZENIE URZĄDZENIA Z RÓŻNYCH TEMP. - NALEŻY ODCZEKAĆ 3h



**CHRONI PRZED UPADKIEM**



**CHRONI PRZED PRACĄ W NISKICH TEMP.**



**CHRONI PRZED WILGOCIĄ / NIE ZANURZA W CIECZACH**