



ACTIV

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GIO-Elegante E-1015

Urządzenie kosmetyczne 4 w 1



Panel

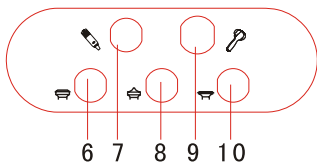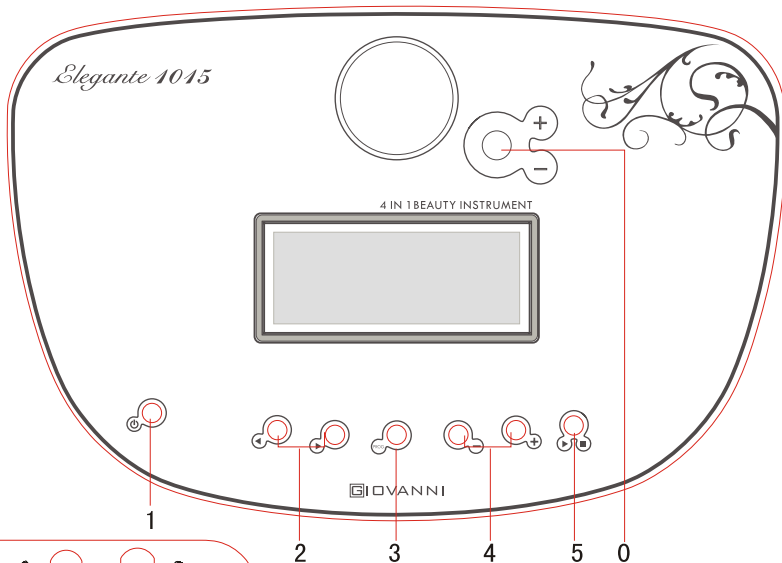

0. Pokrętło do regulacji ssania

1. ON/OFF

2. Wybór funkcji

3. Zatwierdzenie/ powrót/nast. funkcja

4. Regulacja parametrów

5. Start/Stop

6. Gniazdo na głowicę ultradźwięki – twarz

7. Gniazdo na peeling kawitacyjny

8. Gniazdo na głowicę ultradźwięki – oczy

9. Gniazdo na głowicę ciepło-zimno

10. Gniazdo na głowicę ultradźwięki – ciało

11. Głowica ciepło-zimno

12. Głowica ultradźwięki – oczy

13. Głowica ultradźwięki – ciało

14. Głowica ultradźwięki – twarz

15. Głowice do mikrodermabrazji

16. Szpatuła do peelingu kaw.

■ Mikrodermabrazja

D-100 D-180 D-180 D-200 D-100

Naskórek

D-200 D-200 D-150 D-200

Skóra normalna

Małe obszary
płatki uszu

Mikrodermabrazja diamentowa

Jest to zabieg, podczas którego za pomocą ścierających diamentowych końcówek oraz pompy ssącej zluszczamy powierzchowne warstwy naskórka.

Podobnie jak w przypadku innych technik odmładzających, w celu ograniczenia lub usunięcia drobnych zmarszczek czy przebarwień konieczne może być przeprowadzenie więcej niż jednego zabiegu. Zalecana seria zabiegów to 3 w odstępie około 2-3 tygodni. Przy usuwaniu rozstępów zalecamy 5 do 10 zabiegów w odstępach dwutygodniowych.

Mikrodermabrazja jest zabiegiem skutecznym w zakresie zmniejszania drobnych zmarszczek, kurzych łapek, przebarwień i blizn trądzikowych. Stymuluje budowę komórek skóry i kolagenu. Jest to bardzo popularny nieinwazyjny zabieg kosmetyczny.

Zalety mikrodermabrazji diamentowej:

- bezpieczna, kontrolowana głębokość ścierania
- alternatywa dla nietolerujących peelingu chemicznego
- zwiększenie poziomu absorpcji aplikowanych składników aktywnych
- stymulacja mikrokrążenia
- wzmocnienie zdolności obronnych skóry
- pobudzenie skóry do produkcji kolagenu i elastyny (odnowa skóry właściwej)


Zastosowanie :

- wskazania do mikrodermabrazji
- blizny potrądzikowe
- zaskórniki, prosaki
- rozszerzone pory
- szorstki, zrogowaciały naskórek
- wiotkość skóry
- odmładzanie skóry i likwidacja delikatnych zmarszczek wokół oczu ust i szyi
- rozstępy
- suchość skóry
- przebarwienia i odbarwienia
- uszkodzenia posłoneczne skóry (twarz, ręce, szyja)
- blizny zanikowe i przerosłe
- rogowacenie okołomieszkowe
- trądzik pospolity (zaskórnikowy, grudkowy)
- łojotok
- zabieg jest idealnym przygotowaniem do zabiegów laserowych: fotoodmładzania, rozszerzonych, popękanych naczyń krwionośnych oraz przebarwień

Mikrodermabrazja diamentowa



GŁOWICE I DYSZE DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA:

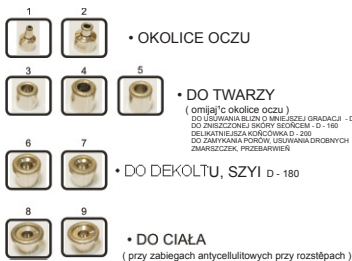

Intensywność zawsze dostosujemy do odczuć klienta.
W trakcie zabiegu zmieniamy głowice w zależności od rodzaju skóry klienta oraz miejsca, na jakim ten zabieg wykonujemy.

Na przykład:

okolice oczu - głowica delikatniejsza, o mniejszej gradacji (D180 do D250)
skóra wrażliwa, rozszerzone naczynka (D250)
skóra ziemista, źle ukrwiona, głowica o większej gradacji (D120 lub D160)


Montaż dyszy z głowicą diamentową oraz filtrem siateczkowym:

1. Dysza
2. Gumowa uszczelka
3. Filtr siateczkowy
4. Głowica diamentowa

Przed zabiegiem należy zamontować filtr siateczkowy (pkt. 3) i dobrą odpowiednią głowicę.

UWAGA!

Brak zamontowanego filtra siateczkowego może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Wymiana wielorazowego filtra następuje po każdym zabiegu.

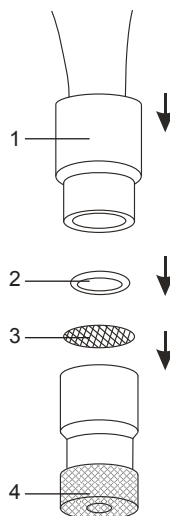

rys.8




Podłącz rurkę do głowicy




Odkręć nakrętkę




Połącz nakrętkę z rurką

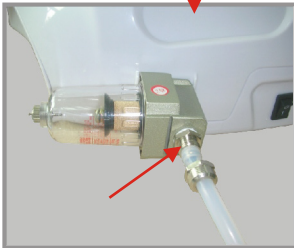

Połącz rurkę z urządzeniem

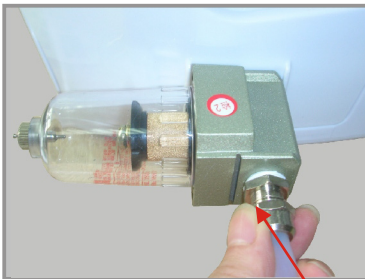



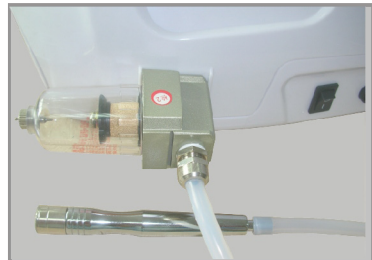


Dokręć nakrętkę



Praca z urządzeniem

1. Mikrodermabrazja

- 1.Przyciskami  zaznacz pozycję mikrodermabrazji
- 2.Przyciskiem  przejdź do następnego ekranu
- 3.Przyciskami  ustaw żądany czas zabiegu
- 4.Aby zwiększyć ssanie należy przekreślić 
- 5.Przyciskiem  rozpocznij zabieg.



rys. 2-1



rys. 2-2

Zabieg mikrodermabrazji:

1. Do demakijażu stosujemy mleczko SYIS. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera mocznik o działaniu silnie zmiękczającym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji w głąb skóry.
2. Nakładamy peeling enzymatyczny SYIS, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową chustą zabiegową
4. Tonizujemy skórę tonikiem antybakteryjnym SYIS, aby przywrócić jej naturalne pH . Tonik zawiera kwas mlekowy, mający działanie złuszczące i antybakteryjne.
5. Wykonujemy zabieg mikrodermabrazji 20-25 minut
6. Po zabiegu tonizujemy skórę tonikiem antybakteryjnym SYIS
7. Za pomocą mezoterapii bezigłowej lub sonoforezy wykonujemy zabieg mający na celu wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz podniesienie odporności skóry na czynniki fizyczne. Falami ultradźwiękowymi wprowadzamy w głębokie warstwy skóry wybraną ampułkę SYIS. Zabieg przeprowadzamy z użyciem substancji sprzęgającej – żel chłodzący ACTIV

AMPUŁKA COLLAGEN pure 100%

Ampułka kolagenowa zawierająca rozpuszczony kolagen zatrzymujący wodę w skórze .

WZMACNIAJĄCA AMPUŁKA DO CERY NACZYNIOWEJ

Zawiera wyciąg z perełkowca japońskiego bogatego w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne. Olej rycynowy wzmacnia suchą skórę, a zawarty w ampułce retinol oraz witamina E zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Dzięki olejkowi cynamonowemu ampułka ma działanie antybakteryjne.

AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA

Zawiera hydrolizowane proteiny mleczne, przypominające naturalne NMF (naturalny czynnik nawilżający). Ampułka ma działanie liftujące.

8. Aby wyciszyć i ukoić skórę wykonujemy masaż na zimno z użyciem głowicy cold-warm, następnie tonizujemy skórę.

9. Na skórę aplikujemy maskę algową SYIS połączoną z aktywatorem do alg SYIS

10. Nakładamy krem pod oczy SYIS

11. Połączenie kwasu mlekowego i tlenku cynku gwarantuje szybki efekt napinający i ujędrniający. Dzięki zawartości tlenku cynku krem doskonale likwiduje oznaki zmęczenia, usprawnia mikrokrążenie, obrzęki i zasinienia wokół oczu.

12. Na zakończenie zabiegu aplikujemy krem do cery naczyńniowej SYIS zawierający witaminę E, olej migdałowy o działaniu nawilżającym, panthenol o właściwościach łagodzących, BHA – właściwości delikatnie złuszczone.

13. Na koniec zabiegu dla wyrównania kolorytu aplikujemy krem korygujący kamuflaż SYIS

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGU

w serii wykonujemy średnio od 5 – 10 zabiegów,
w przypadku terapii przeciwtrądzikowej w odstępach około 3 tygodnie,
w terapii przeciwzmarszczkowej w odstępach około 10-15 dni,
w celu podtrzymania efektów zabieg powtarzamy co około 5 miesięcy.

ZALECENIA PO ZABIEGU

Unikać słońca, solarium – do około 3 tygodni po zabiegu,
Stosować filtry UV >30,
Intensywnie nawilżać skórę,
Unikać sauny, basenu do 5 dni po zabiegu,
Pić dużo wody mineralnej, niegazowanej,











PRZECIWWSKAZANIA DO MIKRODERMABRAZJI

- zakażenia wirusowe: brodawki, opryszczka, mięczak zakaźny
- zakażenia bakteryjne: liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa
- zakażenia grzybicze
- trądzik krostkowy, ropowiczy
- trądzik różowaty
- skóra powiek
- przeczasy, nadżerki (uszkodzenia ciągłości skóry)
- nowotwory skóry i znamiona
- naczyniaki jamiste
- terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem-wskazana co najmniej 3 miesięczna przerwa
- skłonność do keloidów (bliznowców)
- zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy (do 2 miesięcy)

NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ W PRZYPADKU

- menstruacji
- skóry opalanej
- ciąży

Ruchy głowicy

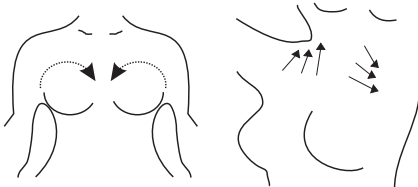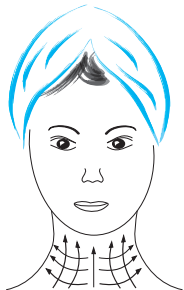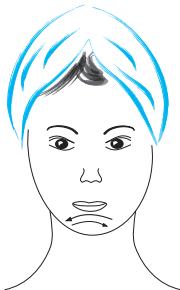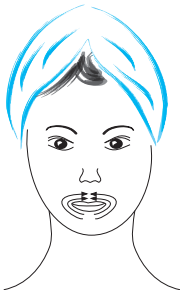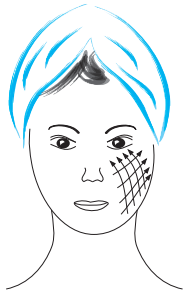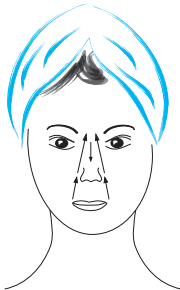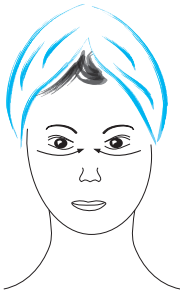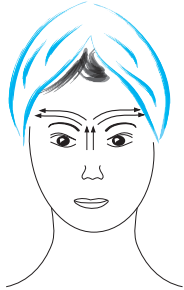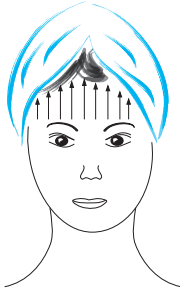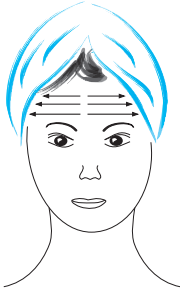


Peeling kawitacyjny (skin scrubber)

PEELING KAWITACYJNY


Peeling kawitacyjny jest to oczyszczanie skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowej. Pozwala on nie tylko na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, ale również na pozbycie się zaskórników. Oczyszczanie i złuszczenie naskórka następuje za pomocą zjawiska kawitacji, które zachodzi, gdy wilgotną skórę potraktuje się falami ultradźwiękowymi.

SONOFEREZA


Masaż ultradźwiękami

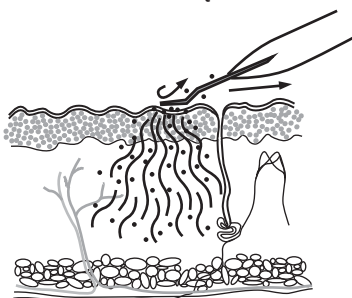

Prasowanie zmarszczek

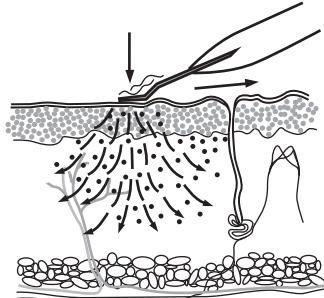



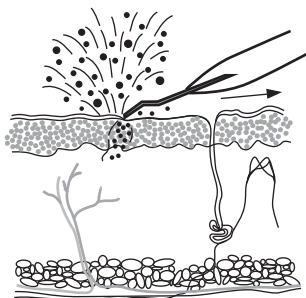


PILING KAWITACYJNY







Praca z urządzeniem

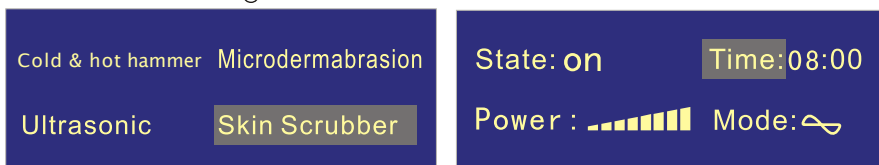2. Peeling kawitacyjny (skin scrubber)

1. Przyciskami  zaznacz pozycję skin scrubber
- .Przyciskiem  przejdź do następnego ekranu
- .Przyciskami  przełączaj pomiędzy pozycjami: state/ time/ mode/intensity ; np. wybierz pozycję czasu (rys. 3-1)
4. Przyciskami  ustaw żądany czas.



5. Przyciskami  zaznacz pozycję POWER a przyciskami  ustaw żadaną opcję
6. Przyciskami  zaznacz pozycję MODE a przyciskami  ustaw żadaną wartość



7. Przyciskiem  rozpocznij pracę.

4. Zabieg na uda

1. Połącz głowicę – ciało do urządzenia
2. Zaaplikuj ampułkę SYIS wraz z żelem do ultradźwięków ACTIV

Ustawienia:

Wybierz głowicę: 

Time :08


Strength : 7

Mode : 

State:off 08'00" Mode: 

Strength:  Output: 

2. Przyciskiem  rozpocznij pracę.

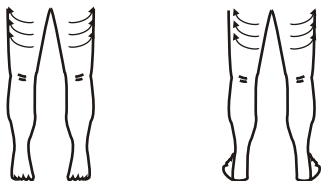

Poruszaj głowicą jak na rysunku przez około 2 minuty

5. Zabieg na biust

1. Połącz głowicę – ciało do urządzenia
2. Zaaplikuj ampułkę SYIS wraz z żelem do ultradźwięków ACTIV

Ustawienia:

Wybierz głowicę: 

Time :04

Strength : 6


Mode : 

State: on Time:04:00

Mode:  Output: 

Power : 

3. Przyciskiem  rozpocznij pracę.

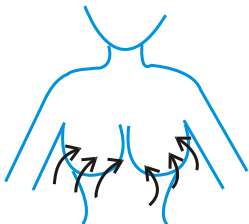


Poruszaj głowicą jak na rysunku

Sonoforeza

1. Podłącz szpatułę do urządzenia
2. Zaaplikuj ampułkę SYIS wraz z żelem do ultradźwięków ACTIV

Ustawienia:

Time :15minutes mode :  intensity : 7

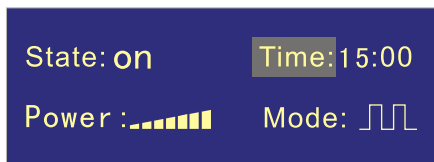








3. Równoległe do skóry przyłóż szpatułę i przesuwaj w tył
4. Po skończonym zabiegu wyłącz urządzenia i wyczyść szpatułę

Głowica ciepło-zimno

1. Zabieg głowicą zimno: uspokaja skórę po zabiegach
2. Zabieg głowicą ciepło: polepsza wchłanianie skóry, polepsza kondycję skóry

Zabieg głowicą ciepło-zimno

1. Przyciskami  zaznacz pozycję Cold & hot hammer
2. Przyciskiem  przejdź do następnego ekranu
3. Przyciskami  przełączaj pomiędzy pozycjami:
4. Przyciskami  zmień wartości State/time/power

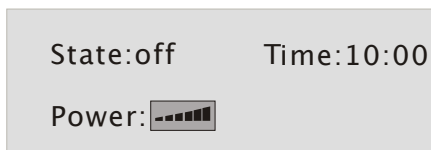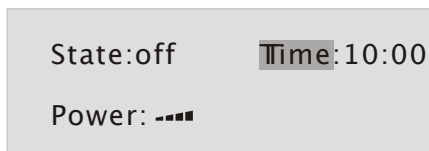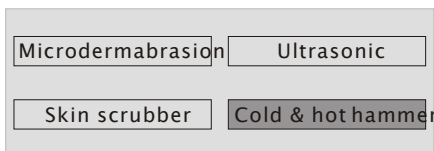


5. Przyciskiem  rozpocznij zabieg.


Zabieg powinien być przeprowadzany od środka twarzy w boki, z dołu do góry

1. Podłącz młotek do urządzenia

Ustawienia:

Wybierz funkcję: Cold & Hot hammer  Time : 05 minut


Intensity : 10

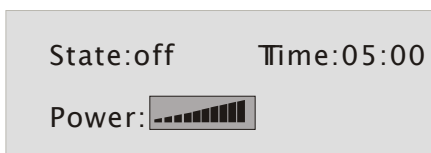

2. Przyciskiem  rozpocznij zabieg.

Przykłady operowania głowicą:

1. Od podbródka do uszów
2. Od podbródka do nosa
3. Od nosa do skroni
4. Od kątek oka do skroni
5. Od czoła do linii włosów

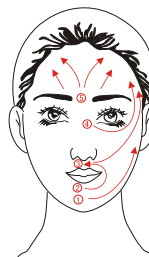

Zabieg peeling kawitacyjny:

1. Do demakijażu wykorzystujemy mleczko SYIS. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera również mocznik o działaniu silnie zmiękczejącym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry.
 2. Nakładamy peeling enzymatyczny SYIS, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
 3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową chustą zabiegową.
 4. Tonizujemy skórę tonikiem antybakteryjnym SYIS, aby przywrócić jej naturalne pH .
 5. Intensywność zabiegu ustawiamy do odczuć klienta, pamiętając aby skóra była cały czas zwilżana,
 6. Należy poinformować klienta o odczuciach tj. delikatne mrowienie, pizczenie w uszach, metaliczny posmak w ustach
 7. Szpatułkę trzymamy pod kątem 45stopni
 8. Czas zabiegu nie powinien przekroczyć 15-20 minut,
 9. Za pomocą sonoforezy wykonujemy zabieg mający na celu wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz podniesienie odporności skóry na czynniki fizyczne. Falami ultradźwiękowymi wprowadzamy w głębokie warstwy skóry wybraną ampułkę SYIS. Zabieg przeprowadzamy z użyciem substancji sprzęgającej – żel chłodzący ACTIV
- AMPUŁKA COLLAGEN pure 100%**
Ampułka kolagenowa zawierająca rozpuszczony kolagen zatrzymujący wodę w skórze .
WZMACNIAJĄCA AMPULKA DO CERY NACZYNIOWEJ
Zawiera wyciąg z perełkowca japońskiego bogatego w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne.
Olej rycynowy wzmacnia suchą skórę, a zawarty w ampułce retinol oraz witamina E zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Dzięki olejkiwki cynamonowemu ampułka ma działanie antybakteryjne.
- AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA**
Zawiera hydrolizowane proteiny mleczne, przypominające naturalne NMF (naturalny czynnik nawilżający). Ampułka ma działanie liftujące.
10. Aby wyciszyć i ukoić skórę wykonujemy masaż na zimno z użyciem głowicy cold-warm, następnie tonizujemy skórę.
 11. Na skórę aplikujemy maskę algową SYIS połączoną z aktywatorem do alg SYIS
 12. Nakładamy krem pod oczy SYIS
 13. Połączenie kwasu mlekowego i tlenku cynku gwarantuje szybki efekt napinający i ujędrniający. Dzięki zawartości tlenku cynku krem doskonale likwiduje oznaki zmęczenia, usprawnia mikrokrążenie, obrzęki i zasinienia wokół oczu.
 14. Na zakończenie zabiegu aplikujemy krem do cery naczyniowej SYIS zawierający witaminę E, olej migdałowy o działaniu nawilżającym, panthenol o właściwościach łagodzących, BHA – właściwości delikatnie złuszczejące.
 15. Na koniec zabiegu dla wyrównania kolorytu aplikujemy krem korygujący kamuflaż SYIS

Częstotliwość zabiegu:

1. Aby efekty były widoczne potrzebne jest wykonanie zabiegu, w serii około 8-10 zabiegów,
2. Efekty widoczne są już po 5-6 zabiegach,
3. Czas trwania zabiegu wynosi około 15-20 minut.

WSKAZANIA

Zmarszczki,
Cera dojrzała,
Rozstępy,
Blizny,
Cellulit,
Skóra szara, zmęczona.

PRZECIWWSKAZANIA:

Ciąża,
Metalowe elementy w organizmie,
Choroby serca,
Rozrusznik serca,
Stany zapalne wirusowe, grzybicze.

1. Peeling kawitacyjny - twarz


Efekty: oczyszcza skórę

1. Podłącz szpatułę do urządzenia

2. Rozpyl wodę na twarz

Ustawienia:

Time : 15minutes Mode : ∞ Intensity : 10

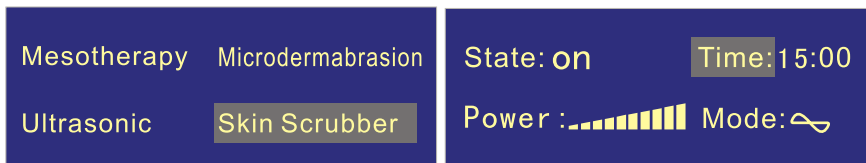





3. Ułóż szpatułę pod kątem 45 stopni w stosunku do skóry i przesuwaj powoli w przód


4. Po skończonym zabiegu wyłącz urządzenie i wyczyść szpatułę

Ultradźwięki

Ultradźwięki to system transportu substancji aktywnych w głąb skóry. Urządzenie wykorzystuje fizyczne zjawisko zachodzące w błonach komórkowych pod wpływem ultradźwięków dzięki temu efekt jednorazowego zabiegu utrzymuje się w skórze nawet do 72 godzin. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, podczas zabiegu klientka odczuwa delikatną wibrację wydobywającą się z głowicy

3. Ultradźwięki

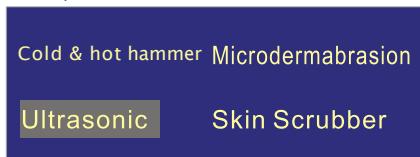

1. Przyciskami  wybierz pozycję ultrasonic
2. Przyciskiem  przejdź do nast. ekranu
3. Przyciskami  przełączaj pomiędzy pozycjami: state/ time/ mode/intensity/ultrasonic output ; wybierz pozycję czasu (rys. 3-1)
4. Przyciskami  ustaw czas





rys. 3-1



rys. 3-2

5. Przyciskami  zaznacz pozycję MODE a przyciskami  ustaw żądaną opcję



6. Przyciskami  zaznacz pozycję POWER a przyciskami  ustaw żądaną wartość




rys. 3-3



rys. 3-4

7. Przyciskami  zaznacz pozycję OUTPUT a przyciskami  ustaw żadaną opcję

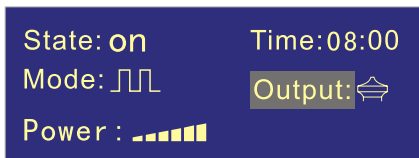

8. Przyciskiem  rozpocznij pracę.

Zabieg z użyciem ultradźwięków:

1. Do demakijażu stosujemy mleczko SYIS. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera mocznik o działaniu silnie zmiękczającym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji w głąb skóry.
2. Nakładamy peeling enzymatyczny SYIS, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową chustą zabiegową
4. Tonizujemy skórę tonikiem antybakteryjnym SYIS, aby przywrócić jej naturalne pH. Tonik zawiera kwas mlekowy, mający działanie złuszczące i antybakteryjne.
5. Za pomocą ultradźwięków wykonujemy zabieg mający na celu wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz podniesienie odporności skóry na czynniki fizyczne.
6. W urządzeniu wstępują dwie fale do wyboru:
 - ciągła- jest falą delikatną służy do wtłaczania substancji w głąb skóry przy zabiegach min przeciwzmarszczkowych, łagodzących uspokajających skórę

przerywana- jest macną falą służącą do wtłaczania substancji aktywnych w głąb skóry. Dodatkowo fala ta powoduje intensywny mikromasaż dzięki temu możemy stosować ją do zabiegów liftujących jak i do zabiegów na ciało.

7. Falami ultradźwiękowymi wprowadzamy w głębokie warstwy skóry wybraną ampułkę SYIS. Zabieg przeprowadzamy z użyciem substancji sprzęgającej – żel chłodzący ACTIV AMPUŁKA COLLAGEN pure 100%
Ampułka kolagenowa zawierająca rozpuszczony kolagen zatrzymujący wodę w skórze .
WZMACNIAJĄCA AMPUŁKA DO CERY NACZYNIOWEJ
Zawiera wyciąg z perełkowca japońskiego bogatego w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne.
Olej rycynowy wzmacnia suchą skórę, a zawarty w ampułce retinol oraz witamina E zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Dzięki olejkiwki cynamonowemu ampułka ma działanie antybakteryjne.

AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA

Zawiera hydrolizowane białka mleczne, przypominające naturalne NMF (naturalny czynnik nawilżający). Ampułka ma działanie liftujące.

8. Aby wyciszyć i ukoić skórę wykonujemy masaż na zimno z użyciem głowicy cold-warm, następnie tonizujemy skórę.

9. Na skórę aplikujemy maskę algową SYIS połączoną z aktywatorem do alg SYIS

10. Nakładamy krem pod oczy SYIS

11. Połączenie kwasu mlekowego i tlenku cynku gwarantuje szybki efekt napinający i ujędrniający. Dzięki zawartości tlenku cynku krem doskonale likwiduje oznaki zmęczenia, usprawnia mikrokrążenie, obrzęki i zasinienia wokół oczu.

12. Na zakończenie zabiegu aplikujemy krem do cery naczyniowej SYIS zawierający witaminę E, olej migdałowy o działaniu nawilżającym, panthenol o właściwościach łagodzących, BHA – właściwości delikatnie złuszczone.

13. Na koniec zabiegu dla wyrównania kolorytu aplikujemy krem korygujący kamuflaż SYIS

Częstotliwość zabiegu:

Aby efekty były widoczne potrzebne jest wykonanie zabiegu, w serii około 8-10 zabiegów, Efekty widoczne są już po 5-6 zabiegach,

Czas trwania zabiegu wynosi około 15-20 minut.

WSKAZANIA

Zmarszczki,

Cera dojrzała,

Rozstępy,

Blizny,

Cellulit,

Skóra szara, zmęczona.

PRZECIWSKAZANIA:

Ciąża,

Metalowe elementy w organizmie,

Choroby serca,

Rozrusznik serca,

Stany zapalne wirusowe, grzybicze.

1. Zabieg na okolice oczu - ultradźwięki

Efekt : usuwa zaciemnione worki pod oczami

1. Zaaplikuj odpowiednią ampułkę SYIS wraz z żelem do ultradźwięków ACTIV.

Ustawienia:

Wybierz głowice: ⇄

Time : 2 minutes

Power (intensywność) : 3

Mode : □□

Mesotherapy Microdermabrasion

Ultrasonic Skin Scrubber

State: on

Time: 02:00

Mode: 

Output: 

Power : 

2. Przyciskiem  rozpocznij zabieg.



Czas zabiegu: po minucie na lewe i prawe oko.

2. Zabieg na twarz

Efekt : przeciwzmarszczkowy

Podłącz głowicę z urządzeniem

Zaaplikuj odpowiednią ampułkę SYIS wraz z żelem do ultradźwięków ACTIV.

Ustawienia:


Głowica:  time :10–15 min.

Power: 4 Mode: 

State: on Time: 08:00

Mode:  Output: 

Power : 

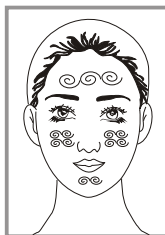

Poruszaj głowicą jak na rysunku przez ok. 2 minuty

Przyciskiem  rozpocznij zabieg.

3. Zabieg na brzuch

1. Podłącz głowicę-ciało do urządzenia

Ustawienia:

Ustaw głowicę:  time : 08


Power : 7 mode: 

State: on Time: 08:00

Mode:  Output: 

Power : 

3. Poruszaj głowicą jak na rysunku:

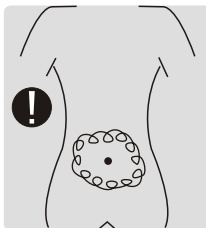

Nazwa		ilość
Urządzenie		1
Głowica ultradźwięków		1
Młotek ciepło-zimno		1
Akcesoria do mikro- dermabrazji		1
Głowica ultradźwięków (oczy)		1
Głowica ultradźwięków (twarz)		1
Filtry		20
Uszczelki	1 1 X 3	10
Głowica ultradźwięków (ciało)		1
Szpatuła do peelingu kawitacyjnego		1
Przewód zasilający		1
Instrukcja		1
Bezpiecznik		2

Parametry techniczne:

Zasilanie: AC110V 220V 230V 240V

Częstotliwość : 50-60HZ

Moc : 62W

Wymiary: 49x44,5x27 cm

Waga : 7 KG

WARUNKI REKLAMACJI:

1. Produkty oferowane w firmie ACTIV są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy Activ we Wrocławiu przy ulicy Potokowej 47, bądź listownie na adres firmy.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i dostarczenia oryginału dowodu zakupu.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny/ faktura VAT).
4. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupu w naszej firmie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
5. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
6. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 - dokładny adres reklamującego
 - dowód zakupu
 - kontakt telefoniczny
 - dokładny opis usterki
 - karta gwarancyjna
 - sytuację w której usterkę stwierdzono
 - wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów na adres: ACTIV ul. Potokowa 47, 54-105 Wrocław. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
8. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
9. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
10. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do firmy ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uważa się datę powiadomienia klienta lub wysłania reklamowanego produktu.
11. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
12. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Reklamacji nie podlegają:
 - Bezpieczniki - Przewody zasilające - Przewody komunikacyjne - Grzałki elektryczne, termostaty - Produkty zalane wodą - Żarówki
 - Uszkodzenia mechaniczne - Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia w szczególności lampy UV i frezarki - Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji - Produkty z przeceny, wyprzedaży, ekspozycji lub gratisy - Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy (1 h pracy , 30 min przerwy)
13. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy
 - jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
14. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Należy pamiętać aby protokoły szkody były sporządzane rzetelnie i zgodnie z prawdą.
15. Naprawiony towar należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia klienta przez serwis. Po upływie tego terminu serwis będzie naliczał koszty magazynowania w wysokości 2% wartości sprzętu i nie mniej niż 5 zł za każdą rozpoczętą dobę.
16. Po upływie 3 miesięcy nieodebrany sprzęt będzie utylizowany.
17. Do serwisu należy dostarczyć czysty towar. Sprzęt brudny będzie poddany usłudze odpłatnego czyszczenia w kwocie 40zł netto.

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny

Data sprzedaży

.....

podpis sprzedawcy