

ACTIV

Urządzenie kosmetyczne GIO-CLASSIC

2 in 1



www.activeshop.pl

-----Skin Scrubber – peeling kawitacyjny


Supersonic skin scrubber jest jednym z bardziej popularnych zabiegów. Zabieg polega na przemianie elektrycznych wibracji w mechaniczne wibrujące z prędkością 28000 razy na sekundę. Zabieg kawitacji oczyszcza i masuje skórę. Skutecznie usuwa plamki, zmarszczki, przyszcze, zrogowaciały naskórek, oczyszcza pory.



-----Mikrodermabrazja

Mikrodermabrazja to zabieg podczas którego za pomocą ścierających diamentowych końcówek I pompy ssącej złuszczamy powierzchowne warstwy naskórka. Zabieg skutecznie redukuje zmarszczki, blizny. Doskonały dla każdego rodzaju skóry. Zabieg można stosować na twarz, szyję, dekolt lub całe ciało. Rezultat widoczny już po pierwszym zabiegu.

Panel

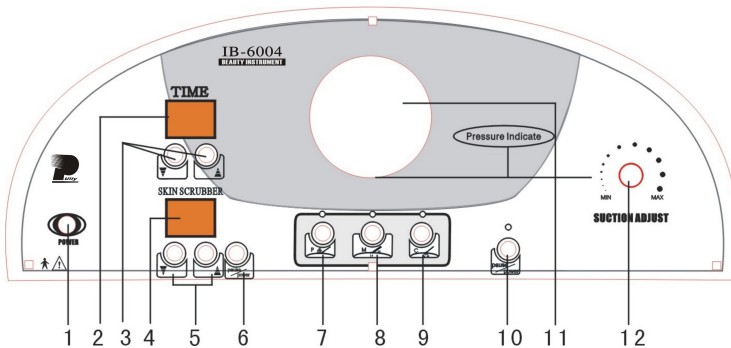

1. Włącznik zasilania
2. Wyświetlacz czasu
3. Regulacja czasu
4. Wyświetlacz intensywności (scrubber)
5. Regulacja intensywności (scrubber)
6. Start/Pauza(scrubber)
7. Tryb peelingu kawitacyjnego
8. Tryb penetracji
9. Tryb usuwania płamek

10. Start/Pauza (mikrodermabrazja)


11. Ciśnieniomierz

12. Regulacja ssania

Części zamienne

-----Mikrodermabrazja


Siatka filtra

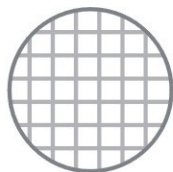

Filter mesh

Diamentowe końcówki

Diamond tips

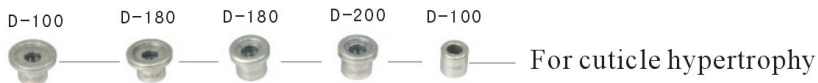

For small area and nose wing

Na małe obszary I płatki nosa



For normal skin

Dla skóry normalnej

Praca z urządzeniem

-----Skin Scrubber – peeling kawitacyjny

1. Tryb skin scrubber


(1). Włącz urządzenie

(2) Podłącz szpatułę do urządzenia


(3) Wciśnij przycisk  (1)

(4) Rozpuł czystą wodę na skórę i utrzymuj na niej wilgoć.

(5) Na początek ustaw czas na 15 min, kosmetyczka może regulować czas

(6) Ustaw intensywność na 10 przyciskami  (5)

(7) Ustaw tryb przyciskiem  (7)

(8) Urządzenie zacznie pracować po wciśnięciu przycisku  (10)

(9) Czyszczenie skóry: Ustaw szpatułę pod kątem 45 stopni w stosunku do skóry I posuwaj naprzód (rys. 3)

(10) Wyłącz zasilanie urządzenia I wyczyść szpatułę po skończonym zabiegu.

2. Penetracja ultradźwiękami

(1). Włącz urządzenie


(2) Podłącz szpatułę do urządzenia

(3) Wciśnij przycisk  (1)


(4) Use the cream or gel for whitening,,water or remove spot and wrinkles.

(5) Na początek ustaw czas na 15 min, kosmetyczka może

regulować czas.

(6) Ustaw intensywność na 07 przyciskami  (5)

(7) Ustaw tryb przyciskiem  (8)

(8) Urządzenie zacznie pracować wciskając przycisk 

(9) Ustaw szpatułę równoległe do powierzchni skóry I posuwaj naprzód.(rys. 1.2)

(10) Wyłącz zasilanie urządzenia I wyczyść szpatułę po skończonym zabiegu.


3. Tryb usuwania plamek.


(1) Włącz urządzenie


(2) Wciśnij przycisk  (1)

(3) Użyj kremu bądź żelu

(4) Na początek ustaw czas na 15 min, kosmetyczka może regulować czas

(5) Ustaw intensywność na 05 przyciskami  (5)

(6) Ustaw tryb na  (9)

(7) Urządzenie zacznie pracować po wciśnięciu przycisku 

(8) Ustaw szpatułę równoległe w stosunku do skóry I po jakimś czasie zacznij przesuwac.

Wskazówki:

1.Zabieg na twarz nie może przekroczyć 15 minut.

2.Do zabiegu należy użyć kremu lub żelu, wrzeciwnym

wypadku może dojść do uszkodzenia skóry.

3. Możesz użyć urządzenia tylko raz w miesiącu jeśli chodzi o usuwanie zrogowaciałego naskórka. W przeciwnym razie skóra utraci swoją naturalną ochronę.

-----Mikrodermabrazja

1. Podłącz przewód zasilający do urządzenia I włącz.
2. Wybierz odpowiednią diamentową końcówkę I podłącz rurkę do urządzenia.

3. Wciśnij przycisk  by ustawić czas na 15min.


4. Im cieńsza skóra tym mniejsze ssanie, dlatego powinno się ustawić mniejsze ssanie na wrażliwsze obszary.

Nota:

Występują różne rodzaje końcówek. W pierwszej kolejności użyj końcówki z dużymi diamentami, później użyj mniejszych.

5. Wciśnij przycisk  by uruchomić zabieg.

6. Przed zabiegiem wybróbuj na swojej dłoni. Użyj palców by rozszerzyć skórę. Podziel obszar twarzy na część lewą, prawą, górną I dolną. Poruszaj diamentową końcówką jak na rysunku. Nie należy przetrzymywać końcówki w jednym miejscu dłużej niż 15 sekund.

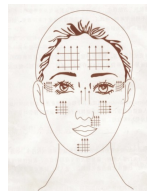

7. Czyszczenie:

(1). Po abiegu należy wyczyścić końcówki przy pomocy pędzla I wody.

- (2). Włóż końcówki na 15 minut do roztworu składającego się z 75% alkoholu.
- (3). Wyciągnij je i wytrzyj.
- (4). Na koniec wysterylizuj końcówki sterylizatorem UV.

Parametry techniczne

Zasilanie: AC () 230V

Częstotliwość: ()50Hz ()60Hz

Moc:75W

Wymiary opakowania: 54x40x23CM

Waga: 5.5KG

Rozwiązania prostych dysfunkcji

Dysfunkcja	Rozwiązanie
Zasilanie włączone, urządzenie nie działa	Sprawdź czy przewód zasilający jest podpięty
	Sprawdź czy przycisk uruchamiający jest włączony
Słaba moc ssania	Sprawdź czy rurka jest odpowiednio podłączona
	Check whether there is any block on the filter mesh, or if the pipe is broken
Urządzenie przegrzewa się	Używane zbyt długo nagrzewa się, należy wyłączyć I odczekać aż temp. spadnie
	Sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony
Brak zasilania	Sprawdź bezpieczniki, jeśli jest spalony wymień

Zawartość paczki

Nazwa		ilość	
Baza urządzenia		1	
Mikrodermabrazja handle and tips		1	3 głowice 9 końcówek
Rurka		1	
Filtr		20	
uszczelka		10	
szpatuła		1	
Shelf		1	
Przewód zasilający		1	
bezpiecznik		2	
Instrukcja użytkownika		1	

Nota bezpieczeństwa

1. Urządzenie przeznaczone do obsługi przez wykwalifikowany personel kosmetologów.

2. Wszystkie naprawy serwisowe powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną obsługę serwisową.
3. Nie operuj urządzeniem mokrymi dłońmi oraz nie dopuszczaj do sytuacji , w której urządzenie jest mokre lub pracuje w pobliżu wody.
4. Wyciągnij wtyczkę I skontaktuj się z serwisem w momencie gdy:
 - A. Do urządzenie dostała się woda.
 - B. Z urządzenia wydostaje się dym, zapach spalenizny lub hałas.
 - C. Przewód zasilający jest uszkodzony.
 - D. Urządzenie spadło z wysokości.
5. Nie kładź żadnych przedmiotów na przewód zasilający.
6. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka po ukończonej pracy z urządzeniem.
7. Dzieci nie powinny być dopuszczane do urządzenia.

GWARANCJA:

Warunki gwarancji:

- 2.Podstawą reklamacji jest oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura).
- 3.Na wszystkie produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w firmie ACTIV przyznawana jest 12 miesięczna gwarancja.
- 4.Koszty przesyłki reklamowanego produktu pokrywa zamawiający.
- 5.Zgłoszenie reklamacyjne musi być wypełnione czytelnie i zawierać:
 - dokładny adres reklamującego,
 - oryginalny dowód zakupu,
 - kontakt telefoniczny,
 - dokładny opis usterki,

- sytuację w której stwierdzono usterkę,
6. Reklamacja zostaje rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru wraz z pełną dokumentacją na adres **ACTIV Potokowa 47, 54-105 Wrocław.**
 7. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych dokumentów zawartych w punkcie 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
 8. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego będą utylizowane po upływie 3 miesięcy.
 9. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu od zamawiającego.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień klienta (kolor, itp) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji nie podlegają:

13. żarówki
14. bezpieczniki
- (11) przewody zasilające
- (12) produkty zalane wodą
- (13) uszkodzenia mechaniczne,
- (14) uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia,
- (15) usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji,
- (16) produkty z przeceny, wyprzedaży, ekspozycji.

Reklamacją objęte są wady fabryczne. Nie podlegają reklamacji

uszkodzenia z tytułu nieumiejętnego, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem!

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny

Data sprzedaży

.....

podpis sprzedawcy
pieczęć