

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WAPOZON 300A




Własność ACTIV © Wszelkie prawa zastrzeżone

### FUNKCJE WAPOZONU:

1. Otwiera pory w celu dogłębnego wyczyszczenia.
2. Para pomaga skórze w wydzieleniu toksyn
3. Działa zmiękczająco na skórę
4. Podwyższa cyrkulację krwi.
5. Przyspiesza metabolizm komórek.
6. Nawilża i odświeża skórę.
7. Znacznie polepsza rezultaty masażu

Wapozony z tej serii wykonane są z trwałych nierdzewnych materiałów stalowych, podwójnie izolowanej bazy i stabilnej podstawy zapewniającej bezpieczeństwo podczas pracy z wysokimi temperaturami. Urządzenie posiada domyślne ustawienia czasowe, trójstopniową regulację rozpylania i automatyczny kontroler poziomu wody – alarm sygnalizujący za wysoki bądź za niski poziom wody.

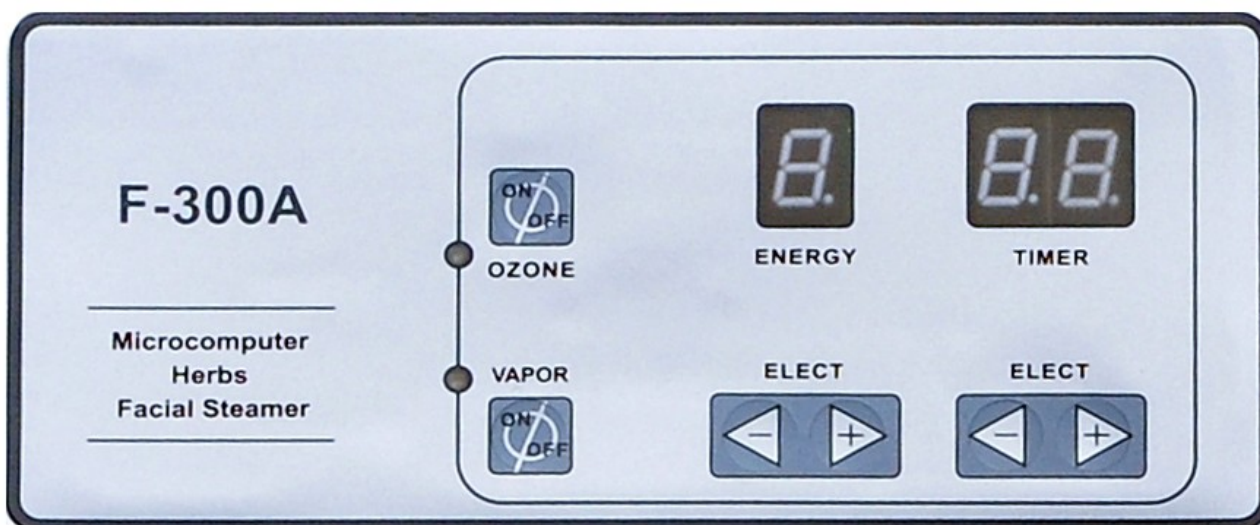

### PANEL:

1. Przycisk trybu OZONE.
2. Przycisk trybu VAPOR.
3. Wyświetlacz wartości energii.
4. Przyciski regulacji mocy energii.
5. Wyświetlacz czasu.
6. Przyciski regulacji czasu.

### Metody pracy z urządzeniem:

1. Odkręć kurek znajdujący się na górnej części wapozonu i wlej wodę do kubka tak, aby poziom nie przekraczał ani min. poziomu ani max.
2. Dla ziołoterapii należy zdjąć siateczkę znajdującą się wewnątrz nakrętki od wlewu wody i do małego metalowego pojemniczka włożyć torebkę z ziołami
3. Aby wykonać aromaterapię należy wlać parę kropli olejku do końcowej części rozpylacza.
4. Włącz przewód do wtyczki.

5. Urządzenie przeprowadzi auto-test i przejdzie w stan gotowości. Wciśnij przycisk VAPOR, zapali się zielona lampka a wyświetlacz czasu pokaże 15 minut. Wyświetlacz energii pokaże „0”. Urządzenie automatycznie sprawdzi stan wody, jeśli jest zbyt niski lub za wysoki, wyda sygnał dźwiękowy i zablokuje wszystkie przyciski oprócz przycisku VAPOR.
6. 5-stopniowa regulacja rozpylania: przyciskami 4 można ustawić moc rozpylania. Na początku zabiegu należy ustawić na maksymalną moc, czyli 5, a później stopniowo ją dopasowywać w zależności od wymagań.
7. Przyciskami 6 ustaw czas zabiegu. Domyślne ustawienie to 15 minut.
8. Funkcja OZONE: wciśnij przycisk OZONE, po chwili powinno być czuć zapach ozonu.
9. Gdy podczas zabiegu poziom wody zejdzie poniżej minimum, urządzenie automatycznie wyłączy się blokując wszystkie przyciski prócz VAPOR i wydając sygnał dźwiękowy.
10. Po skończonym zabiegu urządzenie wyłączy się automatycznie i wyda 5 krótkich sygnałów dźwiękowych.

### **SUGESTIE:**

Rodzaje skóry, wskazana odległość dyszy od twarzy i zalecany czas zabiegu:

- przetłuszczająca się, słaba cyrkulacja krwi: dystans 35-40 cm przez około 15 min
- normalna: 34-40cm przez 10 min
- wrażliwa i sucha: 40-45 cm przez 5 min
- rozszerzone naczynka: 40 cm przez 5 min

### **BEZPIECZEŃSTWO:**

1. Koniecznym warunkiem pracy z urządzeniem jest dobre uziemienie instalacji elektrycznej.
2. Nie należy rozpylać pary od górnej części twarzy, może to spowodować oparzenia.
3. Nie należy wlewać przegrzanej wody (powyżej 50 stopni C), może uszkodzić urządzenie.
4. Nie należy wystawiać pracującego urządzenia na promienie słoneczne.
5. Jeśli urządzenie nie będzie pracowało poprawnie, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Nigdy samodzielnie nie naprawiaj urządzenia.
6. Używaj tylko i wyłącznie czystej wody. Nie należy wlewać do zbiorników różnego rodzaju olejów, płynów zielarskich i tym podobnych materiałów. W przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia dyszy bądź całego urządzenia.

### **PARAMETRY TECHNICZNE:**

Zasilanie: 220-240V, 50~60 Hz

Moc: 800W

Waga: 8,5 kg

Wymiary: 87,5 x 34 x 35 mm

