

KARTA GWARANCYJNA

UWAGA : FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDA PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH, KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJ CE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJ ZAKUPU NA WŁASN ODPOWIEDZIALNO .

WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstaw przyj cia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodno ci towaru z umow zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesi czna odpowiedzialno sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupuj cy.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawiera :
 - dokładny adres reklamuj cego
 - dowód zakupu
 - kontakt telefoniczny
 - dokładny opis usterki
 - sytuacj w której usterek stwierdzono
 - wszystkie podane informacje musz by CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ci gu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamuj cego wymaganych dokumentów
Serwis nie przyjmuje adnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawieraj ce wymaganych danych z punktu 4 nie b d realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamuj cego .
7. Przesyłki anonimowe co do których nie mo na ustali danych wysyłaj cego po upływie 3 miesi cy b d utylizowane.
8. Za dat przyj cia reklamacji uznaje si dat dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamuj cego wymaganych dokumentów. Za dat wykonania naprawy uwzgl dnia sie dat wysłania reklamowanego produktu do klienta
9. Ró nice wynikaj ce z indywidualnych ustawie komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mog by podstaw reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegaj wyl cznie wady ukryte powstałe z winy producenta
Reklamacji nie podlegaj :
 - Bezpieczniki
 - Przewody zasilaj ce
 - Grzałki elektryczne, termostaty
 - Produkty zalane wod
 - arówki
 - Uszkodzenia mechaniczne
 - Uszkodzenia powstałe na skutek zapalenia w szczególno ci lampy UV i frezarki
 - Usterki powstałe na skutek niewła ciwej konserwacji
 - Produkty z przeceny, wyprzeda y ekspozycji lub gratisy
 - Przegrzania urz dzenia na skutek zbyt długiej pracy (1 h pracy 30 min przerwy)
 - Głowice do frezarek
 - Uszkodzenia wynikaj ce z niewła ciwego monta u (stoliki, szafka, biurka)
 - Potłuczone szklane podzespoły i akcesoria urz dze
 - Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez u ytkownika.
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umow kupuj cy mo e da :
 - w pierwszej kolejno ci - nieodpłatnej naprawy.
 - je li naprawa jest niemo liwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo je eli sprzedawca nie zdoła uczyni zado takiemu adaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za po rednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich b d rozpatrywane wyl cznie na podstawie protokołu sporz dzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki s ubezpieczone , Nale y pami ta aby protokoły uszkodzenia były sporz dzane rzetelnie i zgodnie z prawd

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA GIOVANNI ELEGANTE 1012 Urz dzenie do elektrostymulacji



L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny

Data sprzedaży

.....
Podpis sprzedawcy
pieczęć

Szanowny Kliencie


Dzi kujemy za wybranie naszych produktów. Dla osi gni cia najlepszych mo liwo ci urz dzenia i zapewnienia jego bezpiecznego działania prosz przed zastosowaniem zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi. Prosz zachowa instrukcj do wgl du.

Wstęp	3
Funkcje i działanie lecznicze	3
Panel sterowania	4
Sposób postępowania	5 - 7
Instrukcja obsługi	8
Propozycja zabiegu wyszczuplającego	8
Przebieg zabiegu	9 - 12
Przeciwwskazania	13
Lista akcesoriów	13
Ważne uwagi odnośnie bezpieczeństwa	14
Dane techniczne	14
Problemy i sposoby postępowania	15
Karta gwarancyjna	16

Urządzenie służy do modelowania sylwetki potrafi skutecznie zniwelować nadmiar tkanki tłuszczowej. Pozwala na szybką utratę wagi dzięki punktowej stymulacji mięśni. Jest to nowoczesny sposób utraty wagi. Zastosowanie urządzenia pozwala utrzymać doskonałą figurę po zrzuceniu zbędnych kilogramów. Urządzenie wyposażono w obwód skanowania czujności oraz mikrokomputerowy system stymulujący elektrycznie i biologicznie stwarzający warunki zbliżone do akupunktury podobnej do stosowanej w tradycyjnej chińskiej medycynie. Pozwala to na regularne i głębokie pobudzenie mięśni oraz masaż tkanki mięśniowej. Powoduje to lepszy przepływ limfy, usuwanie toksyn, poprawę mikrokrążenia w ciele, przyspieszenie metabolizmu, wzmocnienie odporności organizmu na choroby, a przede wszystkim usunięcie znacznej ilości komórek tłuszczowych i ujędrnienie skóry.


FUNKCJE I DZIAŁANIE LECZNICZE

- ✓ Utrata wagi:
 - 10 dni jako standardowy okres zabiegowy – możliwość utraty 1-8 kilogramów
- ✓ Wyszczuplenie ciała:
 - 10 dni jako standardowy okres zabiegowy – wyszczuplenie talii o 2-9 centymetrów
- ✓ Ujędrnianie piersi:
 - 21 terapia – ujędrnianie piersi
- ✓ Zastosowanie:
 - utrata wagi, wyszczuplenie ciała, ujędrnianie piersi i wzmocnienie mięśni.
- ✓ Częstotliwość zabiegów:
 - niska częstotliwość w przypadku potrzeby utraty zbędnych kilogramów oraz średnia częstotliwość w przypadku ujędrniania skóry.

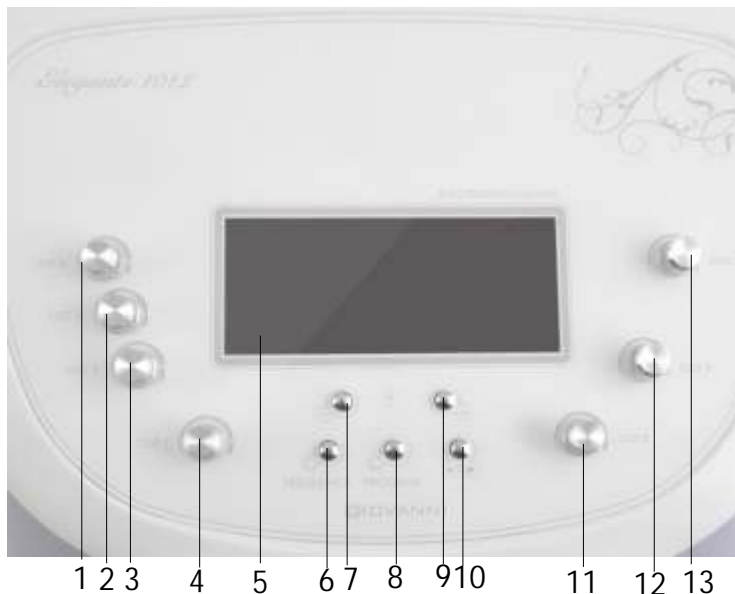

1-4 i 11-13. Regulacja intensywności cz. stotliwości

5. Wyświetlacz LCD


6. Regulacja cz. stotliwości — 

7. Regulacja czasu pracy (zmniejszanie)

8. Wybór programu

9. Regulacja czasu pracy (zwiększanie)

10. Przycisk ON/OFF

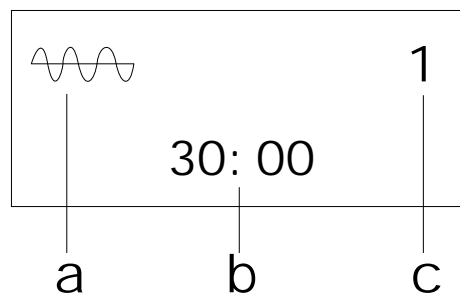

a. Wyświetlacz cz. stotliwości

b. Wyświetlacz czasu

c. Wyświetlacz programu

✓ Program 1:

Niska cz. stotliwości (warstwa powierzchniowa) - biologiczna stymulacja lipolityczna

Funkcja:

Biologiczna stymulacja lipolityczna działa bezpośrednio na komórki tłuszczowe, co powoduje zmniejszenie ich objętości.

Zastosowanie:

Można zastosować na dowolną część ciała, zwłaszcza w przypadku miejscowej otyłości.

✓ Program 2:

Aktywna (głęboka) - biologiczna stymulacja pozwalająca na utratę tłuszczu

Funkcja:

Stymulacja tego rodzaju poprzez skurcze mięśni, powoduje wzrost poziomu kreatyny w tkance mięśniowej a co za tym idzie wzrost jej siły i elastyczności. Reakcja ta wpływa na utratę zmagazynowanego w ciele tłuszczu.

Zastosowanie:

Stosować na głęboko położony tłuszcz.

✓ Program 3:

Biologiczna stymulacja na głębokim poziomie - pozwalająca na spalanie i ujędrnianie ciała

Funkcja:

Długość i cz. stotliwości impulsów w przypadku tej stymulacji są takie same jak w obu powyższych programach, co intensywnie stymuluje włókna mięśniowe i lepiej usuwa głębokie warstwy tłuszczu zmagazynowanego w ciele.

Zastosowanie:

Doskonałe efekty w walce z cellulitem.

✓ Program 4:

Aktywuj ca (uj drniaj ca) stymulacja biologiczna

Funkcja:

Tego rodzaju stymulacja pozwala przyspieszy metabolizm komórek. Działaj c nie tylko na tkank tłuszczow , ale równie na skór powoduje jej uelastycznienie i uj drnienie.

Zastosowanie:

Stosowa na obwód skór .

✓ Program 5:

Stymulacja biologiczna pozwalaj ca na uelastycznienie mi ni

Funkcja:

Długo i cz stotliwo impulsów przesyłanych w przypadku tej stymulacji s du o wy sze ni w programie 3, co wzmacnia włókna mi niowe i poprawia sił ich skurczu. Praca silnych i elastycznych mi ni skuteczniej usuwa gł bokie warstwy tłuszczu zmagazynowane w ciele.

Zastosowanie:

Doskonałe efekty w walce z cellulitem.

✓ Program 6:

Ci gła gł boka stymulacja biologiczna prowadz ca do utraty wagi (detoksykacja i spalanie)

Funkcja:

Jest to stymulacja przy redniej cz stotliwo ci pozwalaj ca na ci głe pobudzenie gł bokich mi ni w celu rozszerzania naczy limfatycznych i poprawy kr enia limfy, co pozwala usuwa kwas tłuszczowy i toksyny z komórek.

Zastosowanie:

Stosowa w przypadku zaburze kr enia limfy, otyło ci z torbielami. Doskonałe działanie detoksykuj ce.

✓ Program 7:

Stymulacja biologiczna przerywanymi falami (poprawa wygl du piersi i bioder)

Funkcja:

Tego rodzaju stymulacja przypomina stymulacj z programu 4; ró nica polega na tym, e w tym programie fale s przerywane, w zwi zku z tym spalanie tkanki tłuszczowej jest umiarkowane, a rozbudowa masy mi niowej intensywna.

Zastosowanie:

Wzmacnianie budowy ciała, uj drnianie piersi, uj drnianie płaskich po ladek.

✓ Program 8:

Stymulacja biologiczna z sinusoidaln modulacj fal i redni cz stotliwo ci

Funkcja:

Tego rodzaju stymulacja pozwala poprawi przepuszczalno komórek, przyspieszaj c wewn trzkomórkow wymian substancji, co powoduje rozszerzenie naczy limfatycznych i popraw kr enia limfy w celu usuwania kwasu tłuszczowego i wewn trznych toksyn oraz uelastycznienia mi ni.

Zastosowanie:

Stosowa na obwisłe piersi, po ladki i skór oraz w celu detoksykacji.

✓ Program 9:

Powtórka programów od 1 do 8.

1. Każde z przycisków nastaw na 0.
2. Sprawdź i podłącz zasilanie. Następnie wciśnij przycisk zasilający umieszczony na tylnym panelu urządzenia.
3. Naciśnij przycisk 10
4. Naciśnij przycisk trybu programu 8 i wybierz program. (Jest 9 rodzajów)
5. Ustaw czas działania przyciskami 7-9.
6. Ustaw intensywność mocy, przekrój ciałki 1-4 i 11-13.
7. Jeżeli w trakcie działania wystąpi konieczność przesunięcia klawisza funkcji, czasu lub intensywności, wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz, a operacja nie zostanie zatrzymana.

PROPOZYCJA ZABIEGU WYSZCZUPLAJĄCEGO

Zabieg wyszczuplający, redukujący cellulit i napinający przy użyciu kosmetyków z serii Drena – Cell firmy MayStar:

Rozpuść 1 zakrętkę toniku Drena Cell Cryotherapy w dwóch zakrętkach letniej wody a następnie dokładnie zwilż w roztworze bandaż elastyczny. Na wybranej części ciała wmasuj okrężnymi ruchami koncentrat antycellulitowy o działaniu silnie drenującym Drena Cell Action Anti-cellulite Concentrate 10 x 10 ml i owinięte ciało mokrym bandażem od dołu do góry rozmieszczając pod nim elektrody według załączonego schematu. Ponieważ tonik ma działanie silnie hipotermiczne które przyspiesza drenaż limfatyczny. Dobrze jest nakryć klientkę kołderką kosmetyczną lub kocem termicznym. Zabieg zakończyć wmasowaniem kre-

PROPOZYCJA ZABIEGU WYSZCZUPLAJĄCEGO

mu rozgrzewajciego Drena Cell Anti-cellulite Cream 500 ml, który działa bezpośrednio na komórki tłuszczowe i rozkłada je przez hydrolizację, regeneruje komórki, napina skórę i stymuluje syntezę kolagenu.

Tak przeprowadzony jednorazowy zabieg gwarantuje utratę od 1 do 5 cm w obwodzie ciała.

Dla podtrzymania i zwiększenia efektów polecamy Drena Cell Gel MayStar, preparat zawierający najnowszy kompleks kofeinowo-fosfolipidowy o działaniu lipolitycznym przeznaczony do codziennej pielęgnacji domowej oraz plastry antycellulitowe Drena Cell, które wpływają na metabolizm komórkowy powodując stopniowe wyszczuplanie (na wybrany fragment czystej i suchej skóry nałożyć jeden plaster, pozostawić na osiem godzin, a następnie zdjąć, nie stosować dwóch plastrów za jednym razem).

Pełna seria powinna składać się z co najmniej 6-10 zabiegów w odstępach 1 tygodnia.

PRZEBIEG ZABIEGU

1. Przymocuj elektrody na danej części ciała w sposób następujący:

Obrazek 1: Szyja i barki.



Funkcja: Pobudzenie krążenia krwi w obrębie szyi i ramion, co przyspiesza przemianę materii i usuwa oznaki zmęczenia.

Obrazek 2: Szyja, barki i ramiona.



Funkcja: Pobudzenie krążenia krwi w obrębie szyi, barków i ramion. Poprawa metabolizmu tkanki tłuszczowej.

Obrazek 3: Piersi




Funkcja: Pobudzenie krążenia krwi w obrębie piersi. Stymulacja rozrostu mięśni piersiowego, bez redukcji tkanki tłuszczowej.

Obrazek 4: Brzuch



Funkcja: Stymulacja krążenia krwi w obrębie powłok brzusznych, redukcja tkanki tłuszczowej oraz uelastycznienie mięśni.

Obrazek 5: Plecy

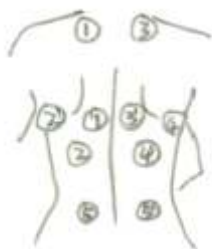

Funkcja: Stymulacja krążenia krwi w obrębie pleców oraz uelastycznienie mięśni grzbietu, co pozwala usuwać nadmiar tłuszczu i łagodzi zmęczenie.

Obrazek 6: Biodra



Funkcja: Stymulacja krążenia krwi w obrębie bioder, co pozwala usuwać nadmiar tłuszczu i wzmocnić mięśnie.

Obrazek 7: Ramiona



Funkcja: Stymulacja krążenia krwi w obrębie ramion co pozwala wzmocnić mięśnie i usunąć nadmiar tłuszczu

Obrazek 8: Nogi



Funkcja: Stymulacja krążenia w obrębie kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i usunięcie nadmiaru tłuszczu.

2. Włącz zasilanie  i wybierz odpowiedni program:

- Zastosowanie na dowolną część ciała, zwłaszcza w przypadku miejscowej otyłości.
- Zastosowanie na tkankę tłuszczową głęboko położoną
- Zastosowanie na cellulit.
- Zastosowanie na obwisłą skórę.
- Zastosowanie na cellulit.
- Zastosowanie w przypadku zaburzeń krążenia limfy, otyłość z torbielami.
- Zastosowanie w celu rozbudowy ciała, ujędrnienia piersi, na obwisłą skórę.
- Zastosowanie na obwisłe piersi, po ciąży i skórę.

3. Ustaw czas, naciskając przycisk regulacji czasu (0-60 minut).



Wyszczuplanie: 30-40 minut codziennie !15 zabiegów)

Pielęgnacja piersi: jednorazowo jednego dnia 20-30 minut (15-30 zabiegów)

4. Ustaw intensywno zgodnie z odczuciami klienta.

Wybierz jeden z czterech trybów cz stotliwo ci.

5. Podczas zabiegu mo na dowolnie regulowa funkcj , czasu i intensywno ci.

6. Wła ciwa intensywno : Poniewa reakcja na przepływ pr du jest cech osobnicz , nat enie pr du nale y zastosowa indywidualnie do ka dego klienta.

Istniej trzy przedziały tolerancji osobniczej:

I zakres odczuwalny: delikatne odczuwanie przepływu pr du

II zakres skurczu: Mi nie zaczynaj si kurczy

III zakres tolerancji: Górna granica tolerancji nat enia przepływu pr du.

CZ CIAŁA	ODPOWIEDNIA DAWKA
Szyja i barki	Limit zmysłowy
Nogi	Limit skurczu, limit tolerancji
Ramiona	Limit skurczu, limit tolerancji
Brzuch	Limit skurczu, limit tolerancji
Piersi	Limit skurczu
Plecy	Limit skurczu, limit tolerancji
Biodra	Limit skurczu, limit tolerancji

7. Po zabiegu nale y sprawdzi czy czas wskazany na wy wietlaczu to 0, a nast -
pnie wył czy przyciski.

8. Nale y wyczy ci i wysterylizowa elektrody po ka dym zabiegu.

Uwaga:

- ✓ Nie nale y nastawia zbyt wysokiej intensywno ci.
- ✓ W przypadku zabiegu w celach wyszczuplaj cych intensywno nale y dostosowa do odczu klienta.
- ✓ W przypadku zabiegu piel gnuj cego piersi nale y wybra nisk intensywno .
- ✓ Skóra w miejscu, w którym zostanie nało ona elektroda powinna by oczyszczona, a intensywno powinna wynosi 0
- ✓ Skóra powinna by pokryta rodkiem przewodz cym fale elektryczne. Nale y rozsmarowa go równomiernie, pokrywaj c cała powierzchni zabiegow .
- ✓ W przypadku problemów ze skór nale y ograniczy liczb zabiegów.
- ✓ Podczas zabiegu intensywno dostosowujemy do odczu klienta.

- Choroby układu krwiono nego
- Choroby skóry (wirusowe, bakteryjne, grzybicze)
- Choroby serca
- Metalowe implanty w organizmie
- Ci a
- Nowotwory i stany rzekomo nowotworowe
- Pora enia spastyczne
- Urz dzenie nie nadaje si do stosowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolno ciach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub nie posiadaj ce odpowiedniego do wiadczenia i wiedzy, chyba e odpowiednio je przeszkolono w zakresie stosowania urz dzenia przez osob odpowiedzialn za bezpiecze stwo.
- Nale y pilnowa , eby urz dzeniem nie bawiły si dzieci.

Nazwa	Jedn.	Ilo	Uwagi
Korpus główny	zestaw	1	
Kabel do podł czania łatki	pasek	10	
Łatka na piersi	szt.	2	
Łatka do elektrostymulacji	szt.	20	
Łatka samoprzylepna	szt.	2	
Kabel zasilania	szt.	1	
Elastyczna ta ma	pasek	0	
Bezpiecznik	zestaw	2	
Instrukcja obsługi	szt.	1	

WAŻNE UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Prosz nie rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania w innych celach niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace naprawcze musi wykonywać upoważniony personel.
2. Prosz nie rozmontowywać ani obsługiwać urządzenia w pobliżu wilgotnych miejsc lub mokrymi rękami. Nie wolno rozlewać płynów na urządzenie.
3. Prosz wyjąć wtyczkę z gniazdka w następujących sytuacjach, a następnie skontaktować się z profesjonalnym serwisem:
 - a) urządzenie miało kontakt z cieczą,
 - b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje głośnie i intensywne dźwięki,
 - c) kabel został uszkodzony,
 - d) urządzenie zostało przewrócone lub jest zepsute.
4. Nie wolno kłaść ostrych przedmiotów na kablach. Nie należy umieszczać sprzętu w miejscach, gdzie ktoś może nadeprnąć na kabel.
5. Nie wolno wkładać niczego do gniazdka w urządzeniu. W przeciwnym razie grozi to porażeniem lub porażeniem prądem. W przypadku dostania się obcego przedmiotu do urządzenia, nie wolno samemu wyjmować przedmiotu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem lub naszą firmą.
6. Prosz nie umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, a także chronić je przed przewróceniem i uszkodzeniem.
7. Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji podanych na wstępie bez uprzedniego zawiadomienia klienta.

DANE TECHNICZNE

Napięcie AC 220-240V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Moc: 40 W

Wymiary zewnętrzne opakowania: 55 x 38 x 20 cm

Waga brutto: 5 kg

PROBLEMY I SPOSOBY POSTĘPOWANIA

PROBLEM	POSTĘPOWANIE
Urządzenie nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź czy napięcie jest w gniazdku 2. Sprawdź czy przewód zasilający jest wpięty do gniazdka i do urządzenia. 3. Sprawdź czy włącznik jest ustawiony w pozycji 1. 3. Sprawdź czy bezpiecznik nie jest uszkodzony 4. Sprawdź czy przycisk ON/OFF jest w pozycji ON. 5. Sprawdź czy jest nastawiony czas.
Urządzenie ma zasilanie lecz nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź czy są podłączone przewody do urządzenia. 2. Sprawdź czy są podłączone przewody do łatek. 3. Sprawdź czy jest ustawiony odpowiedni program. 4. Sprawdź czy czas nie jest ustawiony na 00:00 5. Sprawdź czy odpowiednie potencjometry są dobrze wyregulowane.

W przypadku gdy sprzęt nadal nie działa lub działa niepoprawnie należy odebrać go do serwisu, na adres: ACTIV Serwis, 54-105 Wrocław, ul. Potokowa 47

 ACTIV & MayStar

54-105 Wrocław
ul. Potokowa 47
tel. 71/346 46 14
tel. 71/352 09 02
fax 71/347 99 63

www.giovanni-italia.pl
www.activeshop.com.pl

 GIOVANNI

TWÓJ DYSTRYBUTOR